

Реэпитол

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета по
новой медицинской технике
Ф. Т. Холтоев
02.06.2021 г. ПК №11

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Название медицинского изделия:

Реэпитол

Состав:

рафинированная смола ели обыкновенной (Picea abies)

Форма выпуска и описание медицинского изделия:

бальзам для наружного применения 10%.

Состав:

1 г бальзама содержит:

активное вещество: рафинированная смола ели обыкновенной (прим. 65% раствор в этаноле) – 176,4 мг;
вспомогательные вещества: вазелин, микрокристаллический воск, жидкий парафин, Montane 481 VG (смесь: сорбитан олеат, пчелиный воск, гидрогенизированное касторовое масло, стеариновая кислота).

Механизм действия:

Основной механизм действия бальзама - образование защитной пленки непосредственно на ране. Бальзам обладает противомикробной активностью и формирует противомикробный барьер. Этот механический барьер способствует защите раны от микробного заражения, предотвращает попадание в нее инфекции (патогенные микроорганизмы замедляют заживление ран), способствует повторной эпителизации кожи и естественному заживлению раны. Так как еловая смола не является лекарственным средством, ее фармакологическую активность не изучали.

Область применения:

Реэпитол используется для облегчения заживления инфицированных и неинфицированных, острых и хронических поврежденных кожи: ссадин, трещин, ожоговых ран, трофических и диабетических язв, осложненных хирургических ран и вскрытых волдырей.

Способ применения:

Взрослым и детям: ссадины, повреждения кожи необходимо промыть водой и высушить. Поверхность ран и вскрытые пузыри обрабатываются в соответствии с рекомендациями врача или медсестры. Бальзам Реэпитол следует наносить непосредственно на пораженный участок кожи 1-2 раза в день. При необходимости, пораженный участок следует защитить воздухопроницаемой марлей или повязкой. Реэпитол образует антимикробную пленку на поверхности раны, которая защищает рану от загрязнения и способствует эффективному ее заживлению. Избегайте попадания бальзама в глаза или рот.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам бальзама.

Особые указания:

Применение при беременности и в период лактации

Информации о побочных эффектах при беременности и кормлении грудью не имеется. В связи с недостаточным опытом применения, не следует применять Реэпитол в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с потенциально опасными движущимися механизмами.

Взаимодействия с другими средствами:

Клинически значимых взаимодействий не отмечалось.

Побочные действия:

При применении Реэпитол возможно развитие аллергической реакции на компоненты смолы. Аллергическая реакция на обработанном участке проявляется местным раздражением кожи (аллергический контактный дерматит). Приблизительно 1-3% населения имеют аллергию на смолу. При выявлении каких-либо симптомов аллергии, применение бальзама на основе смолы необходимо прекратить.

Если чувствительность к смолам неизвестна, реакцию на Реэпитол необходимо протестировать на небольшом участке кожи. При появлении в течение 3 дней аллергических симптомов (зуд, покраснение, отек, волдыри и т. д.), бальзам Реэпитол применять нельзя. Если в период лечения симптомы аллергии проявились позже, применение бальзама Реэпитол необходимо немедленно прекратить. В экстренных случаях следует обращаться к врачу.

Форма выпуска и упаковка:

По 30 г бальзама в алюминиевых или ПЭ/АЛ/ПЭ тубах с завинчивающейся крышкой.

По 1 тубе вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в картонную упаковку.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

После первого вскрытия, хранить не более 1 года при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптеки:

Без рецепта.

Производитель:

HELP S.A., Греция

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения:

VEGAPHARM LLP., Великобритания

Адрес организации, принимающей комментарии от потребителей по качеству продукции на территории Республики Узбекистан:

ООО "Ameliya Pharm Service",
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
100015, ул. Ойбек, 36, БЦ «EAST LINE»,
Тел.: +998 78 150 50 81, +99878 150 50 82;
e-mail: uzdrugsafety@eviolet.co.uk



Vegapharm